

## Testevaluierung mit Patientenseren

# Sensitivitätsdaten

### Biognost® IFT Nachweise

Parameter:	ANAHEp
------------	--------

Parameterbeschreibung D

Antinukleäre Antikörper auf Hep-2 Zellen

---

<b>unterer Referenzwert:</b>	<b>0</b>
<b>Anzahl untersuchter Seren:</b>	<b>35</b>
<b>Standardabweichung:</b>	<b>4776</b>
<b>mittlerer Titer:</b>	<b>3979</b>
<b>oberer Titer:</b>	<b>16384</b>
<b>Anzahl Seren &lt; Referenzbereich:</b>	<b>0</b>
<b>Sensitivität:</b>	<b>100%</b>
<b>Stand:</b>	<b>11.09.2023</b>

Die hier präsentierten Daten wurden in der Zeit von 1989 bis zum Ausdruck dieses Dokumentes erhoben. Ein Teil der Seren, die dieser Auswertung zugrunde liegen, wurde in der Zwischenzeit verbraucht und ist somit nicht mehr vorhanden.

Die Patientenseren erhalten wir:

- von namhaften amerikanischen Blutspendeinstituten, bei denen wir Patientenseren für unsere positiven Kontrollen beziehen.
- von Instituten aus dem In- und Ausland, die uns Seren zur Überprüfung ihrer Ergebnisse einsenden.
- von Referenzlabors (WHO, NIBSC, PEI, RKI etc. ) im In- und Ausland, bei denen wir Standardseren für die Testevaluierung beziehen oder die uns charakterisierte Seren zur Verfügung stellen.

Alle Daten werden mit Einzelseren erhalten.